

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Tableau des opérations

Statut	Date de l'opération	Opérateur	Motif de l'opération
Création	19/08/2026	Pinto Isabelle	CHgt T°
Rédaction	25/08/2026	Sciacchitano Vincenza	
Relecture	26/08/2026	Rommes Chantal	
Vérification	01/09/2026	Pinto Isabelle	
Approbation	02/09/2026	Bartziali Styliani	

Historique des versions

Version	Date de début d'applicabilité	Responsable
1	06/08/2013	Pinto Isabelle
2	29/10/2014	Pinto Isabelle
3	05/05/2015	Pinto Isabelle
4	01/05/2018	Pinto Isabelle
5	19/05/2020	Pinto Isabelle
6	10/05/2022	Pinto Isabelle
7	17/02/2023	Pinto Isabelle
8	28/05/2024	Pinto Isabelle
9	07/05/2026	Pinto Isabelle
10	02/09/2026	Pinto Isabelle

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Tout prélèvement doit être effectué dans la mesure du possible AVANT toute antibiothérapie, traitement antiviral ou corticothérapie

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Mise en culture au laboratoire de bactériologie																	
Aspiration endotrachéale			X							Aspiration des sécrétions broncho-pulmonaires par la sonde d'intubation	2-8°C	Le plus rapidement possible	B006	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à 2-8°C	J+5
Biopsie colique								X		Sans objet	15-25°C	Le plus rapidement possible	B009	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2	Sans objet	J+4
Biopsie gastrique								X		Recherche d'Helicobacter pylori	15-25°C (-80°C >24h)	Le plus rapidement possible, à l'abri de la lumière	B013	Ensemencement sur boîte de pétri	J+3	Sans objet	J+30
Coproculture		X								Recueillir une noix de selles dès émission, un échantillon muco-purulent ou sanglant sera choisi si présence	2-8°C	Le plus rapidement possible	B001 B008	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct sur demande Recherche systématique EPEC, Adéno et Rota < 2ans Recherche Clostridium Hospitalisés et CHNP	J+2 *	6 jours à 2-8°C	J+4

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Expectoration			X							De préférence, recueillie le matin, au réveil, après rinçage bucco-dentaire à l'eau du robinet et à la suite d'un effort de toux pour ramener les sécrétions accumulées pendant la nuit	2-8°C	Le plus rapidement possible	B001	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à 2-8°C	J+5
Gorge					X					Ecouvillonnage des amygdales ou, en leur absence, des piliers du voile du palais et de la paroi postérieure du pharynx.	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+4
Hémoculture				X						https://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/hygiene-hospitaliere/Recommandations-soins/Abords-veineux/SPCI_FT_-Pr-l-vement-d-H-mocultures_V02_102025.pdf	15-25°C	Dès que possible	B010	Culture à 35°C dans Bact/ALERT 3D	J+7 *	Sans objet	J+10
						X				Liquides de ponction hors LCR							
KT							X			- Prélever quelques cm de l'extrémité distale - Pour les cathéters courts, prélever la totalité de la partie insérée	2-8°C	Le plus rapidement possible	B001 B011	Ensemencement sur boîte de pétri (méthode Cléry)	J+2	6 jours à 2-8°C	J+4
Langue/ bouche					X					Sans objet	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+4

	Site E - ETTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Lavage broncho-alvéolaire (LBA)			X							Effectué par fibroscopie, la fraction alvéolaire sera mise en culture	2-8°C	Le plus rapidement possible	B001 B006	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à 2-8°C	J+5
LCR						X				La ponction lombaire doit être réalisée avec une asepsie rigoureuse. La quantité moyenne souhaitable de LCR nécessaire est de 3 ml au moins. Le recueil se fera dans 3 tubes stériles, destinés à l'examen biochimique, cytologique et bactériologique	15-25°C	Sans délai	B011	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2 *	-20°C	J+4
Liquides divers (pleural, péritonéal, ascite, péricardique, articulaire, synovial, kyste)						X				L'échantillon sera recueilli dans un récipient stérile, après désinfection de la peau et 2 flacons d'hémoculture peuvent être inoculés en parallèle (si volume assez important c.à.d. 10 ml/flacon).	15-25°C	Le plus rapidement possible	B001 B011	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+7
Matériel							X			Os, tissus, vis, prothèse, pacemaker,	15-25°C	Le plus rapidement possible	B001	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2 J+7 J+14	6 jours à température ambiante <i>Culture prolongée de 14 jours sur demande</i>	J+7/J+14

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
MRSA					X					http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/Labo/Autres-Documents/Changement-Frottis.pdf	15-25°C	48h	B005 B007	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2 *	6 jours à température ambiante	J+4
MDRO					X					Frottis rectal	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2	6 jours à Température ambiante	J+5
Œil					X					Eviter la toilette faciale avant l'examen	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+7
Oreille					X					Prélever le pus après désinfection si otite moyenne aiguë	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+7
Pus					X					Frottis de plaie, frottis de plaie opératoire, frottis d'abcès, frottis divers ...	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+7
Redon/Drain							X			Placer le matériel ou l'extrémité du redon dans un pot stérile ou récolter le liquide de drain dans un pot stérile	2-8°C	Le plus rapidement possible	B001 B011	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2	6 jours à 2-8°C	J+4

	Site E - ETTÉLBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Sinus					X					Soit par frottis, soit par aspiration du pus Cf. Liquide divers	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+7
Spermoculture									X	Toilette intime avant prélèvement	15-25°C	Le plus rapidement possible	B001	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2	6 jours à température ambiante	J+4
Urétral					X					Sans objet	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+5
Urine : par cathétérisme urétral	X									Prélèvement réalisé par le médecin	15-25°C	2h	B001 B002	Ensemencement sur boîte de pétri	J+1	24h à 2-8°C	J+4
											2-8°C	24h					
Urine : poche pédiatrique	X									Cf. http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/Labo/Pre-analytique/Consignes-relatives-aux-pr-l-vement-faits-par-les-patients-urines_uroculture-Versioun-3.0.pdf	15-25°C	2h	B003	Ensemencement sur boîte de pétri	J+1	24h à 2-8°C	J+4
											2-8°C	24h					

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Urine : ponction sus-pubienne	X									Désinfecter les téguments	15-25°C	2h	B001 B002	Ensemencement sur boîte de pétri	J+1	24h à 2-8°C	J+4
											2-8°C	24h					
Urine sondée	X									http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/hygiene-hospitaliere/Hygiene-et-soins/Techniques-de-soins/HH-PRO-TX-002-Sondage-v-sical.pdf	15-25°C	2h	B001 B002	Ensemencement sur boîte de pétri	J+1	24h à 2-8°C	J+4
											2-8°C	24h					
Urine spontanée ou mi-jet	X									Cf. http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/Labo/Pre-analytique/Consignes-relatives-aux-pr-l-vement-faits-par-les-patients-urines_uroculture-Versioun-3.0.pdf	15-25°C	2h	B001	Ensemencement sur boîte de pétri	J+1	24h à 2-8°C	J+4
											2-8°C	24h					
Vaginal					X					Sans objet	15-25°C	24h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+5
Verge/prépuce					X					Sans objet	15-25°C	24h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri + Examen direct	J+2	6 jours à température ambiante	J+5

	Site E - ETTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Recherche spécifique réalisée <u>sur demande</u> au laboratoire de bactériologie																	
Adéno/ Rotavirus		X								Sans objet	2-8°C	3 jours	B001 B008	Test immuno - chromatographique	J+1 *	6 jours à 2-8°C	J+1
												-20°C					
Antigènes (Ag) bactériens	X									Recherche Ag <i>Légionnelle</i>	2-8°C	14 jours	B001 B002 B003	Anticorps polyclonaux	J+1 *	24h à 2-8°C	J+1
	X									Ag Str pneumoniae	2-8°C	14 jours	B001 B002 B003	Anticorps polyclonaux	J + 1*	24h à 2-8°C	J+1
<i>Chlamydia trachomatis</i>	X									Cf. http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/services-et-unites/service-de-support/Labo/Pre-analytique/Consignes-relatives-aux-pr-l-vement-faits-par-les-patients-urines_uroculture-Versioun-3.0.pdf	2-8°C	Dès que possible	B001	PCR	J + 1*	6 jours à 2-8°C	J+1
					X					Frottis urétraux, vaginaux ; recueil de cellules épithéliales	15-25°C	24h	B005 B014 B018	PCR	J+1 *	6 jours à 2-8°C	J+1
					X					Œil : essuyer délicatement la zone conjonctivale de l'œil, en recueillant tout pus ou décharge			B005 B014 B018				J+1

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
										présente.							
Cristaux						X				Dans liquide articulaire, sur tube citrate (bleu)	2-8°C	24h	B012	Microscopie à lumière polarisée	J+2	6 jours à 2-8°C	J+1
Gonocoque					X					Frottis génital	15-25°C	24h	B001 B005 B018	PCR	J+1 *	6 jours à 2-8°C	J+1
	X									Urines du matin 1er jet	2-8°C	Dès que possible	B001	PCR	J+1	1 jour	J+1
Influenzae A+B H1N1 (grippe)					X					Frottis viral (nez+gorge)	15-25°C	24h	B017 B018	PCR	J+1	6 jours à température ambiante	J+1
Mycoplasma/ uréaplasma										Urines : 200 µl à transférer immédiatement dans R1	2-8°C	48h après placement dans Mycoplasma R1	B001 B005 B014 B015 B018 +R1 B016	Galerie : • Identification • Numération indicative • Tests de sensibilité	J+2	Sans objet	J+2
	X				X					Frottis urétraux, vaginaux à transférer immédiatement dans Mycoplasma R1							J+2
Norovirus		X									2-8°C	24h	B008	Immuno Chromatographie	J+1	6 jours à 2-8°C	J+1

	Site E - ETTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Parasites urinaires					X					Recherche de <i>Trichomonas</i> dans frottis vaginal et urétral	15-25°C	24h	B005	Microscopie	J+1 *	6 jours à 2-8°C	J+1
										Recherche de <i>Trichomonas</i>	15-25°C	2h	B001 B002 B003		J+1 *	24h à 2-8°C	J+1
											2-8°C	24h			J+1	J+1	
											15-25°C	2h			J+1 *	24h à 2-8°C	J+1
	X										Recherche de <i>Bilharziose</i>	2-8°C			24h	J+1	J+1
PCR LCR						X				Recherches multiples (bactéries, virus, etc.) Tests réservés aux neurologues Leucocytes ≥ 10	15-25°C	Immédiat	B011	PCR	2H	-20°C	J+1
PCR Pneumonia panel plus			X							Recherches multiples (bactéries, virus, etc) Tests réservés à la aux soins intensifs/réanimation	2-8°C	Immédiat	B001 B006	PCR	2H	6 jours à 2-8°C	J+1
RSV					X					Ecouvillonnages rhinopharyngés	Frottis : 15-25°C Lavages : 2-8°C	24h	B005 B017 B018	PCR	J+1 *	6 jours à température ambiante	J+1
			X							Lavages, aspirations peuvent être testés, de préférence un frottis nasopharyngé			B001 B006 B017				J+1
Sang dans les selles		X								Prélever dans un récipient propre et sec	2-8°C	3 jours	B001 B008	Test immuno-chromatique	J+2	Sans objet	J+1

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
SARS-Covid-19					X					Ecouvillon naso-pharyngé	15-25°C	Immédiat	B017 B018	PCR thermique qualitative	15 min	6 jours à température ambiante	J+1
					X									RT-PCR quantitative (CT)	50 min		J+1
Shiga Toxine		X									2-8°C	14 jours	B001 B008	Test Immuno - enzymatique	J+1 *	6 jours à 2-8°C	J+1
<i>Streptococcus agalactiae</i>					X					Dépistage systématique entre 34 et 38 semaines de grossesse (SA)	15-25°C	48h	B005	Ensemencement sur boîte de pétri	J+2 * en cas de grossesse	6 jours à Température ambiante	J+2
Culture <i>Clostridioides</i>		X									2-8°C	<24h	B001 B008	Ensemencement sur boîte de Pétri	J+2	6 jours à 2-8°C	J+2
Toxines, Ag du <i>Clostridioides</i>		X									2-8°C	<24h	B001 B008	Test immuno-enzymatique	J+1 * J+2	6 jours à 2-8°C	J+1

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Prélèvements envoyés au LNS																	
Astrovirus		X								Selles	2-8°C	/	B001 B008	PCR	J+7	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
Bordetella pertussis (Coqueluche)					X					Procéder à un écouvillonnage profond du nez.	2-8°C	/	B015	PCR	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
Chlamydia pneumoniae			X							Expectoration, LBA	2-8°C	/	B001 B006	PCR	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
Coronavirus SRAS-MERS					X	X				http://intranet.chdn.lan/wMedia-intranet/docs/News/2020/Corona/R-alisation-de-frottis-naso-pharyng-LAB-ENR-DIV-091-1.pdf	2-8°C	24h	B005 B017 B018	PCR	J+2	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
CMV											2-8°C	/	B001 B002 B003	- PCR - Culture cellulaire	PCR : J+3 Culture cellulaire : J+21	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
	X			X						/		sur tube EDTA				Cf. LNS	
						X				/		B001 B011 B012	Prélèvement envoyé au LNS			Cf. LNS	
								X		/		B001	Prélèvement envoyé au LNS			Cf. LNS	

	Site E - ETTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Dermatophytes								X		Phanères (cheveux, ongles)	15-25°C	/	B001	- PCR - Culture mycologique	-PCR : J+3 -Culture myco. : J+21	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
EBV Sérologie en 1ère intention					X					Frottis de gorge sec	2-8°C	/	B015	PCR	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
			X									/	B001 B006				Cf. LNS
						X						/	B001 B011 B012				Cf. LNS
Entérovirus		X									2-8°C	/	B001 B008	PCR	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
						X				LCR, Liq. Articulaire		/	B001 B011 B012				Cf. LNS
Herpès simplex					X					Frottis urétraux, vaginaux, œil, pus	2-8°C	/	B005 B015	- PCR - Culture cellulaire	PCR : J+3 Culture cellulaire : J+7	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
			X							LBA			B001 B006				Cf. LNS

	Site E - ETTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
								X		Biopsie			B001				Cf. LNS
						X				LCR : 2ml ; Liq articulaire			B011				Cf. LNS
<i>Legionella pneumophila</i>			X							Expectoration, LBA,...	2-8°C	/	B001 B006	PCR Ensemencement sur boîte de pétri	J+3 J+10	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
Mycobactéries (BK)						X				LCR : 2 ml	2-8°C	/	B013	Coloration	PCR : J+3		Cf. LNS
						X				Liquides divers : 10 à 15 ml. L'idéal est de recueillir sur citrate les liquides sérofibrineux (pleural, ascite, articulaire)	2-8°C	/	B001 B011 B012	Culture sur milieux liquides et solides PCR sur demande	Ex. direct J+3 Culture : 2 mois	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
					X					frottis	2-8°C	/	B001 B011 B012	PCR sur demande	Culture : 2 mois	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
	X									Sur la totalité de la 1ère miction du matin, après restriction hydrique depuis la veille au soir, 3 jours de suite	2-8°C		B001 B002 B003	PCR sur demande	Culture : 2 mois	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
			X							Expectoration, Aspiration, Lavage broncho-alvéolaire	2-8°C		B001 B006	PCR sur demande	Culture : 2 mois	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
							X	X		Prélèvement divers	2-8°C		B001	PCR sur demande	Culture : 2 mois	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			X							Expectoration, Lavage broncho-alvéolaire	2-8°C	/	B001 B006	PCR	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
<i>Pneumocystis jirovecii</i>			X							Expectoration, Aspiration, Lavage broncho-alvéolaire	2-8°C	Prévenir avant envoi	B001 B006	Parasitologie	J+3	Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
Rougeole					X					Frottis naso-pharyngé	2-8°C	48h	B005 B018	PCR - Labo. Référence		Prélèvement envoyé au LNS	Cf. LNS
						X				LCR	2-8°C	48h	B011				Cf. LNS
Prélèvements envoyés « Laboratoires Réunis » (LBR)																	
Calprotectine fécale		X									2-8°C	48h	B001 B008			Prélèvement envoyé au LBR	Cf. LBR
HPV					X						2-8°C	15 jours	B005 B015 B018	PCR		Prélèvement envoyé au LBR	Cf. LBR
Graisses dans les selles		X								Selles fraîches	2-8°C	1 semaine	B001 B008			Prélèvement envoyé au LBR	Cf. LBR
Malabsorption Digestive		X									2-8°C	72h	B001 B008			Prélèvement envoyé au LBR	Cf. LBR
Syphilis					X					Frottis vaginal	2-8°C	15 jours	B005 B018	PCR		Prélèvement envoyé au LBR	Cf. LBR

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Analyse	Nature du prélèvement									Recommandations	Conditions d'acheminement			* Résultat partiel si positif			Résultat final
	urines	selles	respiratoire	sang	frottis	liquide	matériel	biopsie	Sperme		T°	Délai	Contenant cf. figure n°	Méthode	Délai min. de rendu des résultats	Conservation	Délai max de rendu des résultats
Prélèvements envoyés au CHL																	
Recherche Ag Helicobacter pylori		X								Selles	2-8°C	72h	B001 B008	Immun enzymologie	J+1	Prélèvement envoyé au CHL	Cf. CHL
Parasites		X								2 spatules de matières fécales, à acheminer le plus vite possible	2-8°C	48h	B008	Microscopie	J+2	Prélèvement envoyé au CHL	Cf. CHL
Prélèvements envoyés chez Biomnis																	
Galacto-mannane			X							(LBA) RECOMMANDE sur sérum	-18°C	4h	B006	Elisa	téléphoner si urgent	Prélèvement envoyé chez Biomnis	Cf. BIOMNIS

Les résultats importants seront téléphonés et transmis par courriel (résultats partiels *)

Cf. Liste des résultats critiques de bactériologie à téléphoner [LAB-FOR-PR2-016](#)

Tout ajout d'analyse après réception du prélèvement devra être téléphoné au laboratoire de bactériologie, dans la mesure du possible

Plusieurs analyses peuvent être réalisées sur un même échantillon prélevé en quantité suffisante.

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Exemples : selles, LCR, ...

Pour chaque prélèvement il faut PRECISER sa localisation, son heure de prélèvement, son préleveur ainsi que son propre numéro de travail.

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

Liste : matériel de prélèvement bactériologique

B001



B002



B003



Pot stérile standard
disponible au magasin

Tube urine
disponible au magasin

Poche pédiatrique
disponible au magasin

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

B005



Frottis rose pour prélèvement
divers
disponible au magasin

B006



Pot pour aspiration
trachéale
disponible au magasin

B007




Frottis MRSA Kit 3 sites
disponible au magasin

B008



Pot pour coproculture
disponible au magasin

B009

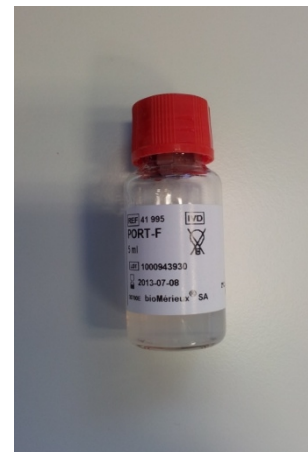

Pot biopsie colique
disponible au laboratoire
de bactériologie (FB5)

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

B010



Flacons d'hémoculture
disponibles au magasin

B011



Tube Liquidraw
disponible au magasin


B012



Tube citrate bleu
disponible au magasin

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

B013

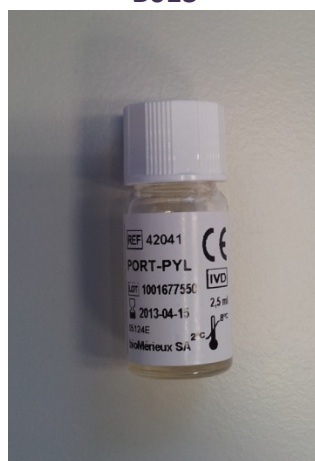

Flacon port-pyl disponible
au laboratoire de
bactériologie (FB5)

B014



Frottis sec fin pour recherche *Chlamydia
trachomatis* chez l'homme
disponible au laboratoire de bactériologie
(BA6)

B015



Frottis sec pour
prélèvements divers
disponible au laboratoire de
bactériologie (BA6)


B016



Flacon Mycoplasma R1
disponible au laboratoire
(FL21)

	Site E - ETTTELBRUCK W - WILTZ	Numéro d'identification LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007
	Structure émettrice LABO - LABORATOIRE	Version 10
	Document de référence LAB-ANN-MAN-PRE-PR1-002-007	Confidentiel Non
	BACT/ Listing des tests effectués au labo bactériologie CHdN	

B017

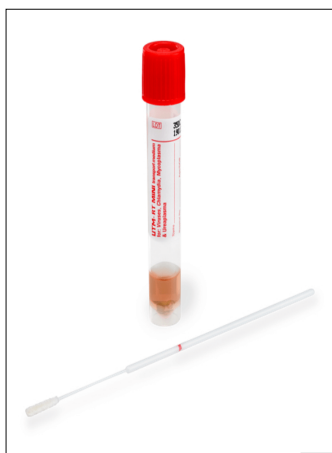

Clinical virus transport medium ctm

Disponible au laboratoire CHdN

B018

